

Pierwsze
uruchomienie
opaski

patron
SOS



1. KUP I ZAREJESTRUJ KARTĘ SIM

- Aktualna lista kompatybilnych sieci komórkowych znajduje się na stronie internetowej opaskadlaseniora.pl/produkt/patron-sos/
- Możesz zakupić kartę prepaid, kupisz ją i zarejestrujesz np.: w każdej Żabce
- Z opakowania wyjmij najmniejszy format karty SIM tj. Nano SIM



Użycie karty SIM z kodem PIN

Jeśli karta SIM, której chcesz użyć do uruchomienia urządzenia, zabezpieczona jest kodem PIN, wykonaj następujące czynności:

- Włóż kartę SIM do telefonu komórkowego, odszukaj odpowiednią funkcję i zdejmij blokadę / PIN z karty SIM. Najczęściej funkcja taka dostępna jest w Ustawienia > Ustawienia Bezpieczeństwa lub Sieć Komórkowa (w iPhone).

Jeśli są wyłączone to załącz na karcie SIM funkcje korzystania z Internetu oraz odbierania połączeń głosowych. (Najczęściej funkcje te są włączone domyślnie na większości kart SIM).

Ważne: Średnie zużycie danych przez to urządzenie wynosi około 100 MB miesięcznie. Upewnij się, że karta SIM jest kompatybilna z siecią 4G (większość kart SIM spełnia ten warunek).

Ostrzeżenie: Jeśli na Twojej karcie SIM nie ma wystarczającej ilości środków lub nie został aktywowany plan, urządzenie nie będzie poprawnie działało. Nie będzie także możliwe ustalenie lokalizacji opaski.

2. AKTYWUJ KARTĘ SIM

Włóż kartę do swojego telefonu i wykonaj z niej połączenie na dowolny numer. Jeśli połączenie się powiodło oznacza to, że Twoja karta SIM jest aktywowana. Wyjmij ją z telefonu.

3. NAŁADUJ URZĄDZENIE

Pamiętaj, że ze względu na ochronę środowiska do Patron SOS nie są dołączane ładowarki. Prawdopodobnie masz już taką w domu, jeśli nie, zakup ją i sprawdź, czy ma wtyczkę do USB.



Każde urządzenie posiada kabel ładujący, zatem możesz je naładować podpinając je na przykład do komputera z wyjściem na USB.

Ostrzeżenie: nie używaj szybko ładujących ładowarek, mogą one uszkodzić urządzenie.

4. ZAINSTALUJ SIM PRZY WYŁĄCZONYM URZĄDZENIU

Ważne jest to, aby w czasie instalacji karty SIM urządzenie było wyłączone.

Poniżej instrukcja jak prawidłowo włożyć kartę SIM. Zdejmij wieczko od karty SIM i połóż je wewnętrzną stroną do góry. W żłobieniu wieczka znajdź "ucięty róg" w odpowiedni sposób wciśnij w wieczko kartę nano SIM.



Ucięty róg
karty



Zwróć uwagę, aby karta SIM była włożona połączonymi stykami do góry tak jak na zdjęciu. Zainstaluj wieczko z powrotem w opasce.

5.

WYŁĄCZ USŁUGĘ POCZTY GŁOSOWEJ NA TELEFONIE OPIEKUNA

Urządzenia wyposażone są w przycisk SOS. Aby mieć pewność, że Patron SOS będzie próbował dodzwonić się do opiekuna (lub kilku opiekunów jeśli dodasz ich numery telefoniczne w aplikacji) każdy z opiekunów musi mieć wyłączoną pocztę głosową na swoim telefonie.

Sprawdź na stronie swojego operatora jaką treść SMS wysłać, aby poczta została wyłączona. Pamiętaj, że wyłączenie poczty głosowej przez operatora może zająć do 24 godzin.

Brawo!

Teraz czas na sparowanie Patrona SOS z naszą darmową aplikacją.

Zanim jednak przejdziesz do tego kroku upewnij się, że urządzenie pozostaje wyłączone. Jeśli z jakis przyczyn jest włączone wyłącz je.



Uwaga: Jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć wyjmij kartę SIM i wyłącz je przyciskiem. Gdy urządzenie jest wyłączone zainstaluj ponownie SIM, ale na tym etapie nie włączaj jeszcze urządzenia.

6.

ZAINSTALUJ DARMOWĄ APLIKACJĘ BEESURE GPS NA TELEFONIE OPIEKUNA

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację (kompatybilną z IOS i Androidem). Użyj smartfona, aby zeskanować ten kod QR, lub wpisz nazwę aplikacji **BeeSure GPS** do App Store lub Google Play.



7. ZAREJESTRUJ SIĘ W APLIKACJI

Postępuj zgodnie z instrukcją i krokami, które pojawiają się w aplikacji.



8. SPARUJ URZĄDZENIE Z TELEFONEM

Na dołączonej do opaski metce przyklejona jest kwadratowa naklejka z kodem QR. Po zeskanowaniu tego kodu Twoim telefonem sparujesz zegarek. Kod możesz wpisać też ręcznie, pamiętaj jednak, że chodzi o kod QR, a nie o numer IMEI, który jest na podłużnej naklejce.

9. WŁĄCZ URZĄDZENIE



Teraz możesz uruchomić urządzenie i odczekać chwilę (maksymalnie 3 minuty), aby połączyło się z siecią oraz sparowało z aplikacją.

Ważne: lokalizacja może być niedokładna, opaska łączy się z sieciami takimi jak hot-spoty WiFi lub sieć LBS.

LBS to alternatywa dla sieci GPS, jest mniej dokładna, ale za to bardziej energooszczędna. Pokazuje lokalizację ostatniej wieży nadawczej, z jaką połączyła się opaska. Wskazuje lokalizację z dokładnością do około 2000m.

Jeśli w aplikacji pojawia się informacja, że urządzenie nie jest w sieci ponownie je włącz i wyłącz (manualnie lub z poziomu aplikacji) lub sprawdź, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana lub czy na karcie SIM dostępny jest pakiet internetu.

Pamiętaj, że to Ty jako opiekun zarządzasz opaską z poziomu aplikacji. Nadaj w aplikacji numery alarmowe, ustaw detektor upadku, czy wyłącz/włącz zegarek.



10. NUMERY ALARMOWE I PRZYCISK SOS

Po wciśnięciu **przycisku SOS** opaska wywołuje telefoniczne połączenie alarmowe z numerem, który wcześniej został zdefiniowany w aplikacji jako numer alarmowy (opiekuna).

W aplikacji, w zakładce „Numery Alarmowe” można ustawić do **3 numerów alarmowych**. Gdy pierwsza osoba nie odbierze połączenia, wtedy opaska dzwoni do kolejnej. Każdy z 3 numerów alarmowych może ściągnąć i używać za darmo aplikację BeeSure.



Pamiętaj, że każdy opiekun musi wyłączyć pocztę głosową w swoim telefonie.

- * Przycisk SOS należy przytrzymać wciśnięty około 5 sec, aż do wycucia wibracji.

11.**USTAW DETEKTOR UPADKU**

Po wykryciu upadku opaska wykona połączenie alarmowe na wskazany numer lub numery alarmowe.

Aby ustawić maksymalnie do **3 numerów alarmowych** wejdź do zakładki „Numery Alarmowe”. Gdy pierwsza osoba nie odbierze połączenia, wtedy opaska dzwoni do kolejnej.

Aby ustawić detektor w aplikacji Beesure GPS otwórz zakładkę „Detektor Upadku”, a następnie włącz detektor i ustaw jego czułość w skali od 1 do 8 gdzie 1 to największa czułość detektora upadku.



12. ZAKŁADKA ZDROWIE

Otwórz aplikację i wejdź do zakładki Zdrowie (ikona z serduszkiem). Tu możesz korzystać z funkcji takich jak: krokomierz, sen, tętno, ciśnienie krwi oraz tlen we krwi.



- * Aby otrzymać wynik saturacji należy wykonać albo pomiar tętna albo ciśnienia krwi. Gdy w aplikacji pojawią się wyniki zwrotne załaduje się także wynik pomiaru tlenu we krwi.



Jeśli pomiary są wysoce nieprecyzyjne wejdź na nasze strony:

opaskadlaseniora.pl/funkcje/zegarek-z-cisnieniomierzem/
opaskadlaseniora.pl/funkcje/cisnieniomierz-i-pulsometr-w-opaskach-dla-seniora/

i sprawdź jak prawidłowo wykonać pomiar oraz zapoznaj się z sekcją „najczęściej zadawane pytania”.



- * Jeśli nie widzisz ikonki Zdrowie oznacza to, że opaska nie sparowała się poprawnie z aplikacją. Aby naprawić błąd należy usunąć urządzenie z aplikacji, odinstalować i ponownie zainstalować aplikację, a następnie ponownie sparować opaskę z aplikacją.

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli w aplikacji pojawia się informacja, że **urządzenie nie jest w sieci** wykonaj następujące czynności:

- sprawdź czy karta SIM należy do operatora, który jest kompatybilny z danym modelem opaski. Pełna lista na stronie opaskadlaseniora.pl/produkt/patron-sos/
- włącz wyłącz urządzenie i/lub sparuj urządzenie ponownie
- upewnij się, że na karcie SIM aktywowany jest pakiet internetu.

Jeśli **nie możesz dodzwonić się** z opaski lub na opaskę wykonaj następujące czynności:

- sprawdź czy karta SIM należy do operatora, który jest kompatybilny z danym modelem opaski. Pełna lista na stronie opaskadlaseniora.pl/produkt/patron-sos/
- włącz wyłącz urządzenie i/lub sparuj urządzenie ponownie.



Uwaga: Pomimo, że technologia stara się nadążyć za zmianami wynikającymi z rozpowszechniania zdalnej opieki, nie zastąpi ona człowieka, a więc musisz wiedzieć że:

Urządzenie, które kupiłeś na stronie opaskadlaseniora.pl nie jest wyrobem medycznym i/lub nie zastąpi wizyty u lekarza. Parametry życiowe sczytywane przez opaskę są orientacyjne i nie mogą być użyte do postawienia diagnozy.

Opis przycisków

patron
SOS



Głośnik

Przycisk SOS

Mikrofon

Odbierz lub Chat głosowy



Złącze ładowarki

Czujniki pomiarów

Port karty SIM



**Dziękujemy za
wybranie naszego produktu!
Zespół opaskadlaseniora.pl**



opaska
dla seniora

